

GR
SK



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: **ΚΟΜΟΔΙΝΟ**

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA: **NOČNÝ STOLÍK**

MOBIAKCARE[®]
M E D I C A L E Q U I P M E N T

REF: 0806647, 0806586

Distribútor: VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
Preklad návodu na použitie zabezpečil distribútor Velcon spol. s r.o.

Τα κομοδίνα αυτά είναι βοηθητικός εξοπλισμός των κρεβατιών νοσηλείας ή των κρεβατιών Νοσοκομειακού τύπου.

Χρησιμοποιούνται κυρίως ως χώρο αποθήκευσης προσωπικών ή και ιατρικών αντικειμένων.

Δύναται να τοποθετηθούν και στις δύο πλευρές του κρεβατιού.

Διαθέτουν μία εξωτερική επιφάνεια, ένα συρόμενο ράφι, ένα συρτάρι και ένα ντουλάπι.

Γενικές Προειδοποιήσεις:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή τον τεχνικό προσωπικό, πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Να μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.

Πριν την Χρήση:

1. Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό
2. Ελέγξτε εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
3. Δώστε προσοχή στο σφίξιμο των βιδών και στα ροδάκια.
4. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του δαπέδου που θα υποστηρίξει το κομοδίνο είναι επίπεδη.
5. Κάνετε τις ρυθμίσεις στο προϊόν χωρίς να έχει φορτίο.

Κατά τη χρήση:

Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο επιτρεπτό βάρος του τραπέζιου.

Για το επάνω μέρος < 20 Kg

Για το ράφι < 5 Kg

Για το συρτάρι < 10 Kg



Συντήρηση & Καθαρισμός:

- Καθαρίστε την επιφάνεια του κομοδίνου μετά από κάθε χρήση του, με μαλακό πανί.
- Καθαρίζετε συχνά κάθε τμήμα του προϊόντος.
- Λεκέδες, λάδια ή υπολείμματα πρέπει να αφαιρούνται από την επιφάνεια του κομοδίνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό.
- Στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην αφήνετε το κομοδίνο βρεγμένο.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.



Προστασία του Περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας το άχρηστο πλέον προϊόν σας στο σωστό σημείο ανακύκλωσης βοηθάτε. στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

	0806647 (1)	0806586 (2)
Σκελετός:	Μεταλλικές Πλαϊνές Επιφάνειες	Μεταλλικές Πλαϊνές Επιφάνειες
	Τα Υπόλοιπα Μέρη είναι Πλαστικά	Τα Υπόλοιπα Μέρη είναι Πλαστικά
Χρώμα:	Λευκό	Μπεζ με αυτοκόλλητα στο χρώμα το ξύλου
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):	44x46x78 cm	50x50x70 cm
Τροχήλατο:	Διαθέτει τέσσερις τροχούς	Διαθέτει τέσσερις τροχούς
	Διαθέτει Δύο Μεταλλικά Στηρίγματα και στις Δύο Πλαϊνές Επιφάνειες	Διαθέτει Δύο Μεταλλικά Στηρίγματα και στις Δύο Πλαϊνές Επιφάνειες

1



2



Εγγύηση:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως φρένα, ροδάκια, παπουτσάκια και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασ του χρόνου.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), εταιρίες μεταφορών.

Φόρμα Εγγύησης

Στοιχεία Αγοραστή

Όνοματεπώνυμο :

Ημ/νία Αγοράς:S/N.....

LOT:.....Τηλέφωνο:

Στοιχεία Καταστήματος

Επωνυμία :

Διεύθυνση:.....

Τηλέφωνο:

Σφραγίδα καταστήματος

Εισαγωγέας:

MOBIAC A.E.

Καθιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη.

T: +30 28210 63222,

www.mobiakcare.com



Určené použitie:

Tieto nočné stolíky sú pomocným zariadením pre ošetrovateľské lôžka alebo lôžka nemocničného typu. Používajú sa najmä ako odkladací priestor na osobné veci alebo zdravotnícke predmety. Môžu byť umiestnené na oboch stranách lôžka.

Skladajú sa z vrchnej dosky, zásuvnej police, zásuvky a skrinky s vloženou policou.

Všeobecné upozornenia:

- Ak si neprečítate tento návod na použitie, je lepšie výrobok alebo inú dostupnú časť nepoužívať.
Ak nerozumiete použitiu alebo bezpečnostným opatreniam, pred použitím výrobku sa obráťte na predajcu alebo príslušného technika, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
- Výrobok uchováajte mimo dosahu zdrojov tepla.
- Buďte opatrní, keď sú v blízkosti deti, a nedovoľte im, aby sa s výrobkom hrali.
- Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie.

Pred použitím:

1. Skontrolujte, či rám nie je poškodený, aby sa zaručilo bezpečné používanie výrobku (rám by nemal byť prasknutý, alebo zlomený).
2. Skontrolujte, či je výrobok správne zostavený.
3. Venujte pozornosť zaisteniu rukovätí, skrutiek a koliesok.
4. Uistite sa, že nočný stolík bude stáť na rovnej podlahe.
5. Nastavovacie úkony vykonávajte bez zaťaženia.



Počas používania:

Neprekračujte maximálnu nosnosť nočného stolíka.

Pre vrchnú časť	<20 Kg
Pre policu	< 5 Kg
Pre zásuvku	<10 Kg



Údržba a čistenie:

- Po každom použití vyčistite povrch nočného stolíka mäkkou handričkou.
- Pravidelne čistite každú časť výrobku.
- Z povrchu nočného stolíka sa musia odstrániť nečistoty, olej alebo zvyšky.
- Na povrchy, ktoré je potrebné vyčistiť, používajte len handričku a jemné mydlo.
- Potom použite čistú handričku a pred použitím výrobku ho riadne osušte. Nočný stolík nenechávajte mokrý.
- Ak potrebujete výrobok dezinfikovať, použite bežný, jemný dezinfekčný prostriedok.

POZOR (!):

- V prípade poškodenia alebo poruchy výrobok **NEPOUŽÍVAJTE** a obráťte sa na autorizovaného a kvalifikovaného zástupcu.
- Nepoužívajte výrobok na účely, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.
- Spoločnosť MOBIAK S.A. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následky vyplývajúce z nesprávneho používania tohto výrobku a z neoprávnených zásahov do rámu výrobku.
- Spoločnosť MOBIAK S.A. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Ochrana životného prostredia:

Ak jedného dňa zistíte, že váš výrobok je potrebné vymeniť alebo vám už nevyhovuje, zvážte ochranu životného prostredia:

- 1) Nevyhadzujte svoj výrobok spolu s ostatným komunálnym odpadom (to je aj podstatou zobrazenej recyklačnej značky).
- 2) Obráťte sa na príslušné miestne úrady, ktoré vás oboznámia s recyklačnými strediskami, v ktorých je potrebné váš výrobok zlikvidovať.
- 3) Správna likvidácia vášho výrobku pomáha ochrane životného prostredia, ako aj recyklácii komponentov výrobku.

	0806647 (1)	0806586 (2)
Rám:	Bočné povrchy kovové	Bočné povrchy kovové
	Ostatné časti vyrobené z plastu	Ostatné časti vyrobené z plastu
Farba:	Biela	Béžová s polepom s imitáciou dreva
Rozmery:	44x46x78 cm	50x50x70 cm
Kolesá:	K dispozícii sú štyri kolieska	K dispozícii sú štyri kolieska
	Na oboch stranách sú dva kovové držiaky	Na oboch stranách sú dva kovové držiaky

1



2



Záruka:

Na výrobok sa vzťahuje záruka na jeden (1) rok od dátumu zakúpenia.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a **NEZAHŔŇA** poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania, nedostatočnej údržby, úprav, nadmerného používania alebo nedodržania návodu na obsluhu. Taktiež sa **NEVZŤAHUJE** na diely, ktoré sa môžu opotrebovať používaním alebo časom.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia alebo závady spôsobené prírodnými katastrofami, neoprávnenou údržbou alebo opravou, problémami s dodaním (ak sú uplatniteľné), dopravcami.

Formulár na uplatnenie záruky:

Údaje kupujúceho

Meno:

Dátum zakúpenia:S/N.....

Číslo šarže:Telefón:

Údaje predajcu

Meno:Velcon spol. s r.o.

Adresa:Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová

Telefón:0800 199 060

Pečiatka predajcu

Dovozca:

MOBIAK S.A.

Kathiana Akrotiriou Chania-Crete,

T: +30 28210 63222, www.mobiakcare.com


MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977