



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA:
INVALIDNÝ VOZÍK PRE DETI „RAINBOW“

REF: 0811311

CE

URČENÉ POUŽITIE

Tieto invalidné vozíky boli navrhnuté pre fyzicky alebo mentálne postihnuté osoby s obmedzenou pohyblivosťou, a to výlučne na prepravu.



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	Oceľ – skladateľný
FARBA	Zelená-Oranžová-Modrá
SEDAČKA	Látka
LAKŤOVÁ OPIERKA	Skladacie
OPIERKY NA NOHY	Odnímateľné, nastaviteľná dĺžka, otočné
ZADNÉ KOLESÁ	24" Kompaktné s lúčmi
PREDNÉ KOLESÁ	8" x 1" Kompaktné (200x25 mm)
BRZDY	Na zadných kolesách

ROZMERY

0811311	33cm	35cm	40cm	41cm	53cm	103cm	91cm	50cm	24"8"	80kg	17,9kg

MONTÁŽ

Prosím pozrite **DODATOK A**

SYMBOLY

Prosím pozrite **DODATOK B**

ÚDRŽBA

Pravidelné kontrolovanie nižšie uvedených postupov pomôže zachovať životnosť a účinnosť vášho invalidného vozíka.

➤ TÝŽDENNE

- Skontrolujte, či je stredný skrutkový spoj priečnej tyče pevný a v dobrom stave.
- Očistite látku mydlovou vodou alebo vhodnými čistiacimi prostriedkami.
- Očistite kovové časti vozíka suchou handrou alebo špeciálnymi prostriedkami na chrómové alebo lakované povrchy.
- Skontrolujte skrutky kolies a v prípade potreby ich utiahnite.
- Skontrolujte poškodenie predných a zadných kolies.

➤ ŠTVRTROČNE

- Skontrolujte a v prípade potreby nastavte: vidlice kolies, ťahacie kolesá, vrtule.
- Namažte alebo naolejujte všetky súčasti vystavené treniu alebo možnému opotrebeniu.
- Utiahnite skrutky a matice.
- Všeobecná kontrola stavu vozíka a oprava podľa potreby.

➤ ROČNE

Odporúčame kompletnú kontrolu raz ročne u kvalifikovaného servisného poskytovateľa. Pre fyzickú bezpečnosť pacienta odporúčame, aby bol vozík skontrolovaný výrobcom každé 2 roky. V prípade opravy používajte iba originálne náhradné diely.

Pri pohybe s vašim vozíkom nezabúdajte na nasledovné!!

Vždy používajte výťahy a rampy. Ak nie sú k dispozícii, môžete sa dostať do cieľa s pomocou dvoch sprievodcov. Musia zachytiť vozík na bezpečne usadených miestach. Vozík by nikdy nemal byť zdvíhaný pasažierom. Mal by byť iba tlačенý.

ČISTENIE

Okrem údržby a kontroly je možné dôkladne vyčistiť aj rám a látku.

- Aby sa zachoval vzhľad, látku je potrebné pravidelne čistiť.
- Nečistoty je možné odstrániť hubkou a jemným čistiacim prostriedkom vo vlažnej vode, čistiacimi pohybmi v smere textúry.
- Prepláchnite čistou vodou predtým, než necháte látku vyschnúť.
- Látku nesusušte v sušičke. Ak sú nečistoty hlboké, povrch očistite mäkkou kefou.
- Rám by mal byť pravidelne čistený jemným čistiacim prostriedkom.
- Invalidné vozíky s koženými sedadlami je potrebné čistiť suchou handrou.
- Kolesá očistite teplou vodou a jemným mydlom. Pri sušení kolies venujte pozornosť, používanie vozíka s mokrými kolesami je nebezpečné.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Sme výlučne zodpovední za vyhlásenie, že zdravotnícke pomôcky uvedené v tomto vyhlásení sú nízkeho rizika (trieda I) a spĺňajú požiadavky Európskeho nariadenia 745/2017 a, kde je to vhodné, príslušné normy a legislatívu.

HLÁSENIE INCIDENTOV:

Každý vážny incident, ktorý nastane v súvislosti s používaním zariadenia, musí byť nahlásený výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom užívateľ a/alebo pacient býva.

DÔLEŽITÉ!

Konstrukcia tohto invalidného vozíka je navrhnutá tak, aby poskytovala maximálnu bezpečnosť. Používatelia však môžu byť ohrození, ak používajú vozík nevhodne. Pre vlastnú bezpečnosť je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá. Nesprávne alebo nešpecifické nastavovacie práce môžu zvýšiť riziko nehôd.

- Vždy noste svetlé oblečenie pri pohybe v tmavých miestach, aby vás ostatní ľahšie videli.
- Buďte opatrní počas prvého používania tohto vozíka.
- Zoznámte sa so svojím vozíkom.
- Používajte vozík na rovine, ako aj do kopca a z kopca.
- Nepokúšajte sa siahť po predmetoch, ak ich potrebujete zdvihnúť zo zeme medzi kolenami.
- Nepokúšajte sa siahť po predmetoch, ak je potrebné presunúť sa na sedadlo.
- Nepoužívajte na cestách alebo diaľniciach.
- Nepokúšajte sa šplhať alebo zostupovať po vode, ľade alebo olejovej vrstve.
- Nepoužívajte nepovolené diely, príslušenstvo alebo adaptéry iné než tie schválené výrobcom.
- Nezastávajú sa vo vozíku.
- Nepoužívajte bočnú opierku ako plošinu pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozíka.

Nastupovanie do vozíka

- Umiestnite vozík čo najbližšie k sebe.
- Oprite sa o rám rukami a pomaly sa spustite na sedadlo.
- Zapnite zámkové kolies.

Vystupovanie z vozíka

- Umiestnite vozík čo najbližšie k sedadlu, na ktoré sa presúvate.
- Presuňte váhu tela na sedadlo počas presunu.

Pri pohybe s vaším vozíkom nezabúdajte na nasledovné!!

Vždy používajte výťahy a rampy. Ak nie sú k dispozícii, môžete sa dostať do cieľa s pomocou dvoch sprievodcov. Musia zachytiť vozík na bezpečne usadených miestach. Vozík by nikdy nemal byť zdvíhaný pasažierom. Mal by byť iba tlačný.



UPOZORNENIE

V prípade problému nepoužívajte vozík, kým nie je problém vyriešený.

- Nepoužívajte produkt na účely, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následky vyplývajúce z nesprávneho používania tohto produktu.
- Výrobca si vyhradzuje právo meniť informácie obsiahnuté v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.
- Poradte sa s lekárom alebo terapeutom, aby ste určili správne nastavenie a správne používanie vozíka.
- Nedovoľte deťom hrať sa na vozíku.
- Nepokúšajte sa zdvíhať vozík za žiadne odnímateľné časti.
- Uchovávajte zabalený vozík mimo zdrojov tepla.
- Nastupovanie a vystupovanie z vozíka môže byť vykonané samostatne, za predpokladu, že máte dostatočnú pohyblivosť a silu hornej časti tela.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ak zistíte, že váš produkt je potrebné vymeniť alebo už pre vás nemá ďalšie využitie, myslite na ochranu životného prostredia:

1. Nehadzujte svoj produkt spolu s bežným komunálnym odpadom (to je aj význam zobrazeného recyklačného symbolu).
2. Kontaktujte svoje verejné orgány, ktoré vás nasmerujú na recyklačné centrá, kam je váš produkt potrebné odovzdať.
3. Správne zneškodnenie produktu prispieva k ochrane životného prostredia, ako aj k recyklácii jeho súčiastok.

ZÁRUKA

Produkt je garantovaný na dobu dvoch (2) rokov od dátumu zakúpenia.

Záruka sa vzťahuje na výrobnú chybu a NEKRÝVA poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou údržbou, úpravami, nadmerným používaním alebo nedodržaním pokynov na používanie produktu. Tiež NEKRÝVA časti, ktoré sa môžu počas používania alebo v priebehu času opotrebovať, ako sú čalúnenie, kolesá, brzdy, drevené alebo plastové časti.

Poškodenia alebo chyby spôsobené prírodnými katastrofami, neoprávnenou údržbou alebo opravou, problémami s napájaním (ak je to relevantné) alebo prepravcami nie sú kryté zárukou.

Žiadny servis ani náhradná časť nie sú kryté zárukou, pokiaľ neboli skontrolované autorizovaným servisným oddelením alebo výrobcom produktu. Náklady na dopravu pri uplatnení záruky hradí používateľ – zákazník alebo predajca.

WARRANTY CLAIM FORM

BUYERS DETAILS			
FULL NAME:			
PURCHASING DATE:		PHONE:	
SELLER DETAILS			
FULL NAME		ADDRESS	
PHONE		SIGN AND SIGNATURE	

MOBIAK S.A

Kathiana Akrotiriou
Chania-Crete, Greece

+30-28210-63222

www.mobiakcare.com

DODATOK A. MONTÁŽ

Najprv skontrolujte obsah balenia.
Umiestnite vozík podľa obrázka. Stlačením tyčí po bokoch sedadla jedným pohybom sa vozík otvorí a dostane do plne otvoreného stavu.



Držte opierku nôh rukou a umiestnite ju podľa zobrazenia. Kolík musí prejsť cez jeho otvor.



Potom umiestnite opierky nôh.



Použite priložený pás, aby ste zabezpečili správne umiestnenie nôh pacienta.



Stlačte kolík a vložte kolieska proti prevráteniu.



DODATOK B. SYMBOLY

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος

Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive